

現場支持率**圧倒的NO.1**

# 『おしぼりふく蔵 SE』

～除菌液がいらない、ただひとつのおしぼり機～

株式会社ウイング



# 導入のメリット

## メリット

### 1. 感染対策

使い捨てのため感染予防・感染防止、カビや嫌な臭い等、衛生環境が向上します。

### 2. 現場スタッフの労務・ストレスの軽減

使用済みのおしぼり（タオル）を『洗濯』、『畳む』、『温め』する作業がなくなります。またビニール袋のごみも少なくなります。より患者様や入居者様のベッド周りへ時間が取れます。

### 3. トータルコストの削減

高品質・高機能で価格も安いです。作業効率アップで見えないコスト削減や院内感染防止も期待できます。※おしぼりを丸める作業をリハビリとして推奨していない地域も増えてきております

万が一の修理の際は部品代のみのご請求で安心です。

# 使用例

1. 清拭、下拭き（陰部清掃） → 紙おむつと一緒に廃棄
2. 食事の際のお手拭き
3. モーニングケアのフェイスタオル
  - ・ 薬液を使用しないので、目元や傷口、おしり等様々な用途で使用できます。



# おしぼりふく蔵SEの製品性能

## 『除菌液がいらない、ただひとつのおしぼり機』

1. 連続50本まで製造可能
2. 60℃～95℃の温度調整（1℃刻み/95℃は驚きの温かさ！）
3. 20cm～35cmの長さ調整（1cm刻みなのでコスト管理ができる！）
4. 紫外線ランプと高温処理による**ダブル除菌システム**
5. 活性炭フィルターで不純物を除去
6. カッター刃逆回転機能
7. 水量調整も可能
8. メモリー機能で**3パターンの長さ、濡れ具合を記憶**
9. 専用ロールは80gと50g 2種類。

（80gは高級厚手杉型エンボス。50gロール紙も破れにくい素材）





※特許出願中（2020年12月1日現在）

# 専用ロールは2種類

## 基本仕様

- 1ケース／24ロール入
- ロール紙は1ロールずつ真空パッケージ
- 環境にやさしい天然パルプ素材を使用

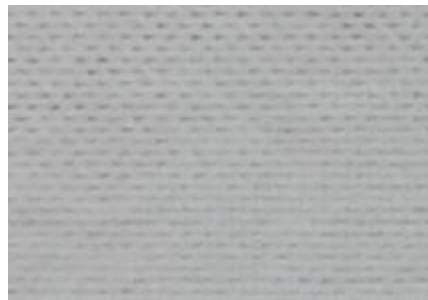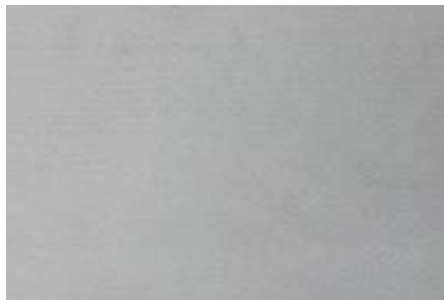

厚み	薄手 (50g)	厚手 (80g)
形状	メッシュタイプ	エンボスタイプ (杉型)
長さ	5.4m巻 幅2.3cm二つ折り	3.4m巻 幅2.3cm二つ折り
製造本数	20cm/270本 25cm/216本 30cm/180本 35cm/154本	20cm/170本 25cm/136本 30cm/113本 35cm/97本
写真		

## 安心のメンテナンス体制

当社はメーカーなので素早い対応可能です。

- 故障やトラブルの場合は、下記までご連絡下さい。
- 修理の場合は、すぐ代替機をお送りさせていただきます。
- 社内のエンジニアによるヘルプデスクあり。

### お問い合わせ先

株式会社ウイング おしぼりふく蔵メンテナンスセンター  
〒306-0125 茨城県古河市仁連351  
TEL : 0280-76-0630 (土日祝除く)  
FAX : 0280-76-0612

# 試験検査成績書

株式会社 ウィング 様

試験検査成績書

受付№ 13-TA-678~680  
 受付年月日 平成 25 年 8 月 23 日  
 報告年月日 平成 25 年 9 月 4 日  
 試験検査責任者 技術部長 高木 靖

厚生労働大臣登録検査機関（食品衛生法）  
 一般財団法人茨城県薬剤師会検査センター

300-4422  
 茨城県高萩市(〒304) 電話 13-678-679  
 受付時間 平成 25 年 8 月 23 日  
 報告年月日 平成 25 年 9 月 4 日

(株) ウィング 様

一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター

試験検査成績書

検査項目	この値	検査結果	検査方法	検査方法	注
製法名	ウェットアイス				
検査内容	日本食品衛生法（食品衛生法）第25条、平成20年(2008)年食農関係3府省令、平成23年(2011)年食農関係3府省令、平成25年(2013)年食農関係3府省令				
検査方法					
検査結果					

検査項目	状況	検査結果	検査方法	検査方法	注
同梱品	○	2.0×10 <sup>6</sup> 個			
大腸菌群(標準平板培養法)	○	検出			
大腸菌(40)	○	検出			
黄色ブドウ球菌	○	検出			
サルモネラ属	○	検出			
緑膿菌	○	検出			
細菌总数(大腸菌法)	○	検出		大腸菌法(1)適用	
— 以下空白 —					

試験検査責任者 技術部長 高木 靖

この成績書と値を記載するものは事前に同梱品センターまでお送り下さい。

この成績書と値を記載するものは事前に同梱品センターまでお送り下さい。

この成績書と値を記載するものは事前に同梱品センターまでお送り下さい。

この成績書と値を記載するものは事前に同梱品センターまでお送り下さい。

この成績書と値を記載するものは事前に同梱品センターまでお送り下さい。

この成績書と値を記載するものは事前に同梱品センターまでお送り下さい。

この成績書と値を記載するものは事前に同梱品センターまでお送り下さい。

この成績書と値を記載するものは事前に同梱品センターまでお送り下さい。

この成績書と値を記載するものは事前に同梱品センターまでお送り下さい。


# おしぼりふく蔵SEの機能紹介

	他社製品	おしぼりふく蔵SE
価格	・高い	・安い
ロール紙	・ビニール袋入 ※十字エンボス	・真空パッケージ ※毛が付きにくい杉型エンボス
除菌方法	・約88℃の熱による除菌 ・専用除菌液	・約95℃の熱による除菌 ・紫外線 (UV) ランプによる除菌
除菌液	・必要 (別途購入)、水補充時に希釈	・不要 (除菌液を使用することも可)
消費電力	・470W (待機時5W)	・350W (待機時5W)
水量調整	・前面ボタン調整 (6段階調整)	・前面ボタン調整 (21段階調整) <特許>
長さ調整	・18、24、30、36、42cm (6cm刻みで5段階調整)	・20~35cm (1cm刻みで16段階調整)
連続排出	・1~50本	・1~50本
水タンク容量	・約2.2L	・約2.4L
外形寸法	・230 (W)×540 (D)×450 (H) mm	・300 (W)×430 (D)×500 (H)mm
余り水	本体を持ち上げてトレイの水を捨てる	前面パネルを開けてベルト下の水受けトレイを引き出して水を捨てる
データ	除菌液のデータ	ボタンを押して出したおしぼりのデータ
カッター刃逆回転機能	・無し	・有り
ベルト逆回転機能	・無し	・有り
メモリー機能	・無し	・有り
カウンター機能	・無し	・有り
バッテリー仕様	-	・有り
専用カート	-	・有り

# 他の素材比較

	布おしぼり・タオル	紙おしぼり	おしぼりふく蔵ロール
品質	<ul style="list-style-type: none"> <li>丈夫でボリュームがある</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>薄く破れやすい</li> <li>防腐剤を使用しているものが多い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>厚みがあり破れにくい不織布</li> <li>キメが細かく肌触りが良い</li> </ul>
素材	<ul style="list-style-type: none"> <li>綿タオル生地</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>多種多様</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>天然パルプの不織布</li> </ul>
価格	<ul style="list-style-type: none"> <li>1本 約5 ～ 20円 ※別途買取り有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1本 約2 ～ 5円</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1本 約3.5 ～ 円</li> </ul>
衛生面	<ul style="list-style-type: none"> <li>リサイクル</li> <li>カビや臭いの問題がある</li> <li>使用したものを回収するまで保管するため臭いの問題がある</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ビニール袋入り</li> <li>時間が経過すると臭いが発生する可能性がある</li> <li>長期保管が難しい（湿り気がなくなる）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>使い捨て（ディスポ）</li> <li>通常待機時は乾いた状態で、製造時に湿らせる</li> <li>抗菌不織布を使用</li> </ul>
作業	<ul style="list-style-type: none"> <li>ホットキャビに詰め替え</li> <li>ビニール袋から出す</li> <li>定期的に本格的な清掃</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ホットキャビに詰め替え</li> <li>ビニール袋から出す</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>不織布ロール紙・水の補充</li> <li>定期的に簡単な清掃</li> </ul>
処理	<ul style="list-style-type: none"> <li>返却（※返却不能なものは買取り）</li> <li>ビニール袋は不燃ごみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>紙おしぼりは可燃ごみ、ビニール袋は不燃ごみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>可燃ごみ</li> </ul>
環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>多量の洗剤を使用</li> <li>ビニール袋ごみが発生</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ビニール袋ごみが発生</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>環境に優しい可燃ごみ</li> </ul>

# おしぼり温度推移

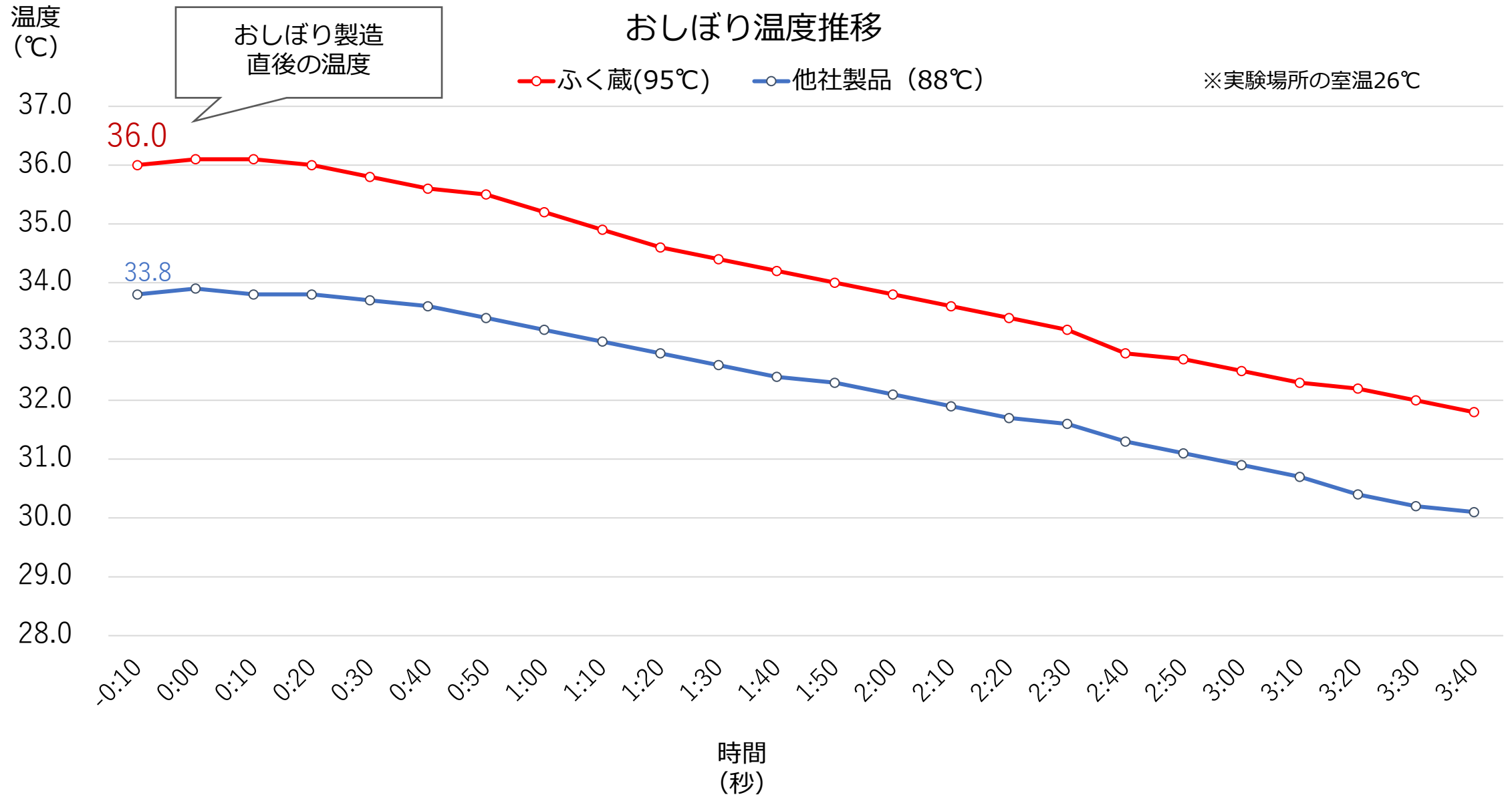

## ふく蔵専用の移動カート



※フロントネットは  
オプションになります

- 天板の取付高さ調整可能
- 転倒防止フレーム付
- 静音キャスター
- 用途に合わせた収納棚

発送単位 : 1台 (組立済)

色 : ホワイト

主材質 : スチール/粉体焼付塗装

重量 : 14 k g

サイズ : W405×D656×H1000

## バッテリー使用例



注意：バッテリー仕様に変更が必要です。

使用例)  
夜間8時間充電、バッテリーで1日4～5時間稼働、150本のおしぼりを製造  
(朝50本、昼50本、夜50本)が可能

# よくあるご質問

Q. 病院、介護施設ではこういった場所、用途で使用されていますか？

A. 病院では、病棟各ナースセンター、透析室、ICU内に設置し排泄物処理の陰部清掃（下拭き）での使用しています。介護施設では、食堂に設置し食事の際の手拭き、ナースセンターに設置し毎朝のフェイスタオルの代わりに使用しております。

Q. 除菌液は必要ですか？

A. 除菌液は基本的に必要ありません。ふく蔵は本体内の紫外線（UV）ランプによる除菌と、ヒータータンクで熱を95℃まで上げる高熱処理によるダブル除菌機能です。現場でより安心、安全を求める場合は除菌液の併用をおすすめいたします。

Q. 大量におしぼり（タオル）を必要とする場合、最後の方に渡るまでに冷めることはないですか？

A. すぐ冷めることはないですが、布おしぼりやタオルと比べると冷めやすいので、各現場に合った方法で保温バッグや清拭車等に入れ保温対策をしていただいております。

## 『おしぼりふく蔵』で検索



URL:<https://wing-koga.com/>

## YouTube『おしぼりふく蔵』で検索



URL: <https://www.youtube.com/channel/UCTYqbwcts8dEhBWCvuRvmEQ>

- 動画内容：
1. 初期セットアップ動画
  2. 機能設定動画 基本操作編①
  3. 機能設定動画 基本操作編②

会社名	株式会社ウイング
本社	〒306-0125 茨城県古河市仁連351
電話番号	0280-76-0630
FAX番号	0280-76-0612
代表	鈴木 美代
設立	平成11年4月
資本金	1000万円
従業員	7名
拠点	茨城本社、東京、名古屋（倉庫）
事業内容	自動おしぼり機のファブレスメーカー ハンドメイド素材のECショップ

## 当社製品紹介

- 病院・介護施設向け製品のファブレスメーカー



※病院、介護施設向けシェア2位（当社調べ）